

New

離れた場所からPCやタブレットで 診療記録の視聴が可能なクラウドサービス

マイクロ診療を手軽に「もっと価値あるもの」にする

『ADMENIC DVP for Cloud』は、記録映像を共有できるクラウドストレージサービスです。MacやWindows PC、タブレットを使用し、カンファレンスルームや分院などから視聴できます。



クラウド上の記録映像は、YouTubeを見るような感覚でWEBブラウザを利用して検索・視聴が行えます。ADMENIC DVP2の操作画面を踏襲することで、直感的な操作を可能にします。

クラウドにアクセスして、ADMENIC DVP2で記録した映像の検索・視聴



診療記録ライブラリ


プレビュー(再生・スキップ・FF/REWのみ)

静止画表示/保存

費用は月額4,400円から


月額料金は、約150時間*の保存が可能な500GBで4,400円(税込)の定額従量制です。500GBを超過した場合、以降500GBごとに3,300円(税込)が加算されます。使用容量はADMENIC DVP2の診療記録ライブラリや、マイページで確認できます。

*録画品質を低画質で運用した場合

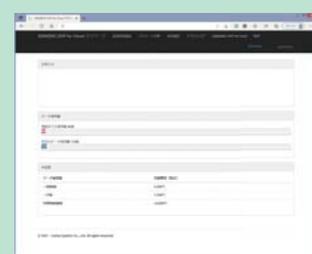

マイページ

料金表(2022年1月現在)

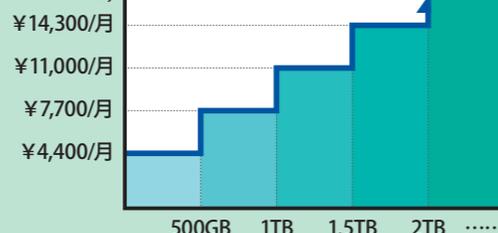

ADMENIC DVP for Cloudのご利用にはクラウドサービスのご契約が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。当社HP (<https://www.carinasystem.co.jp/dvpcloud/>) より、ご契約のお手続きをお願いいたします。

記録映像の管理

記録映像は、専用のUSB外付けRAID/ハードディスク*に保存されます。RAID1形式により、大切なデータを守ります。最大3台までの接続が可能です。また、システム本体内部に個人情報を残さないで、万が一の際にも迅速なメンテナンスやデータの復旧が可能です。
*必ず当社専用品をご使用ください。専用品以外を使用した際に生じた不具合に対してはサポート対象外となります。



複数台のADMENIC DVP2で記録映像を共有

専用の大容量NASシステム*と最大5台までのADMENIC DVP2を院内ネットワーク接続し、どのチェアからも記録データとタグ情報の共有が可能です。ディスク障害に強い特性の為、大切な記録映像の保管にも適しています。
*必ず当社専用品をご使用ください。専用品以外を使用した際に生じた不具合に対してはサポート対象外となります。



専用フルHDカメラで高画質撮影 **数量限定**

Cマウントに対応した専用カメラ「CH-1360」により、フルHD(1920×1080)の高画質映像表示が可能です。本体とカメラの接続は専用ケーブル1本で行い、カメラ側の電源ケーブルや映像ケーブル、コンバータ等は一切不要です。



マイクロ内蔵のカメラ、市販のビデオカメラを接続可能

映像入力用にDVI-D端子を搭載しています。フルHD映像出力が可能なカメラのHDMI端子と映像ケーブルで接続します。

5年間総合保守サポート契約のおすすめ

導入時に不測の事態に発生するリスクを最小限にとどめる5年間総合保守やセンドバック保守の加入をおすすめしています。詳細はお問い合わせください。

仕様

ビデオ入力端子	DVI-D×1 ※コネクタ形状はDVI-I
専用カメラヘッド接続ポート	RJ-45モジュラコネクタ×1
アナログオーディオ入力端子	RCAピンジャック×2
アナログオーディオ出力端子	ステレオミニジャック×1
タッチパネル接続コネクタ	DVI-I×1(下段) ※上段は使用できません
有線フットスイッチ接続コネクタ	6極端子台×1
USB (TYPE A)	USB2.0準拠 (前面×1、背面×4) USB3.0準拠 (背面×2)
電源電圧(ACアダプタ入力/本体入力)	AC100V(50/60Hz) / DC12V
動作温度範囲	5~40℃ (結露なきこと)
消費電力	最大88W
外形寸法(突起物除く) / 質量	212(W)×88(H)×270(D)mm / 約3.2kg

製品構成

- 本体 ■フットスイッチ(ケーブル6m) ■ACアダプタ ■ACケーブル
 - マニュアル・保証書・保守契約案内
- *タッチパネル、USB-HDD、NAS、キーボード・マウス、映像ケーブルは別売です。

対応フォーマット

ビデオ入力フォーマット (DVIデジタル)	1920×1080 60p/59.94p/29.97p/60i/59.94i 1280×720 60p/59.94p
オーディオ入力フォーマット	24bit/2ch
録画フォーマット	H.264(m2ts)、H.264(mp4)
録画品質	高画質/標準/低画質
静止画フォーマット	JPEG、BMP、PNG

ADMENIC DVP for Cloud推奨動作環境

- インターネット光回線
 - 有線LAN環境が必要です。無線LAN接続は動作対応外とさせていただきます。
 - 推奨アップロード速度：40Mbps
 - *Proxy経由でのアップロードおよび視聴には対応していません。
- 推奨視聴環境
Mac OS、iOS、Microsoft Windows10を搭載したPC、ノートPC、10インチ以上のAndroidタブレットPC、iPadで最新版のSafari、Google Chrome、Microsoft Edgeが動作する環境
※iPhone、スマートフォンは非対応

●予告なく仕様または外装の一部を変更することがあります。●別途、設置調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費等が必要になる場合があります。●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。

カリーナシステム株式会社 www.carinasystem.co.jp 【販売店】

神戸本社 〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビルディング7F **078-335-7601**

東京事業所 〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8 ウィラ大森ビル4F **03-6809-1340**

福岡営業所 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 3-6-11福岡フコク生命ビル **092-292-5808**

【メールでのお問い合わせ】 sales@carinasystem.co.jp

営業時間 9:00~18:00(土日祝祭日、当社指定休日を除く)



ADMENIC DVP2

映像記録&プレゼンテーションシステム

革新的な歯科診療の映像記録と プレゼンテーションを実現

マイクロ診療を何倍も「価値あるもの」にする


顕微鏡による診療の映像記録と、記録映像を使用した患者さんへの診療説明がストレスなくシームレスに行える唯一無二の記録&プレゼンテーションシステムです。

- 顕微鏡の視点をそのまま映像で記録
- 「見せる」診療で、どのような診療を行ったかが明確
- 術前・術後比較、描画解説で顧客満足、安心感の向上
- 履歴はIDで管理され、過去の記録をライブラリ化
- クラウドアプリを利用して、別室や分院のPCで視聴



タッチパネルに触れて多彩な再生操作


「早送りは右方向、巻戻しは左方向」、「とりあえずタップすれば再生」などの直感的、感覚的な操作性で画面にタッチする位置で、再生やスキップ、FF/REWなどの操作が行える『マルチファンクションタッチ』を搭載。魅せる診療をしっかりとサポートします。

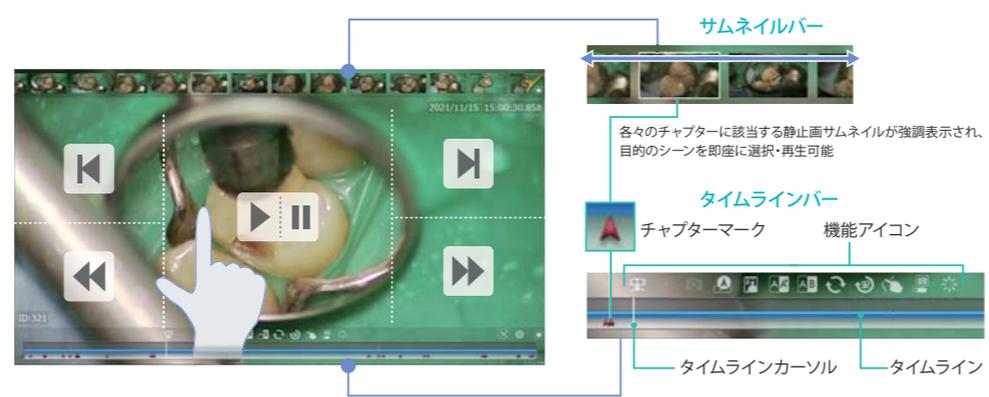

録画中、診療後のプレゼンテーションで見せたい治療のポイントでフットスイッチを踏むとチャプターが設定されます。タイムラインにはチャプターポイント、サムネイルバーには静止画として表示され、即座に目的のシーンの再生が可能です。

治療前/治療後の比較

治療前と治療後の状態をワンタッチで左右に並べて比較できます。

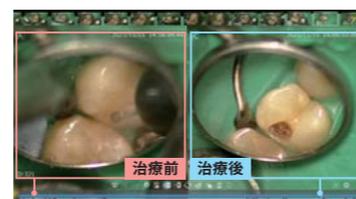


症例映像との比較

事前に用意した症例映像との比較や前回の記録映像との比較が行えます。




画面のズームや回転

スマートフォンの写真や動画を操作するように、ピンチアウト/ピンチインで画面のズームイン/ズームアウトが行えます。良く見たい位置に移動や回転もでき、反転+180°回転も可能です。

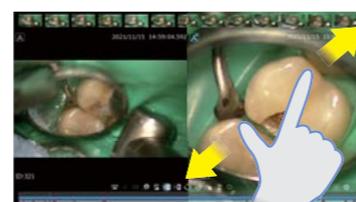


多彩な描画が可能なアノテーション機能

画面上にフリーハンドで描画ができます。治療前/後の説明などをより分かりやすく伝えられます。画面をホワイトボードに切り替えて便利に使うことも可能です。書き込んだ内容は静止画として保存できます。

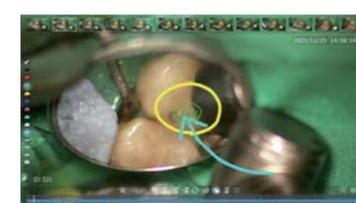

アノテーションモード

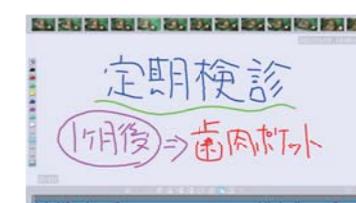

アノテーション・ホワイトボードモード

動画編集機能

学会、症例検討会の映像資料として、必要な部分だけをカット編集して出力することができます。編集集中の映像のトータル時間が表示されるので、適切な長さの動画を作成するのに便利です。

音声や会話の録音が可能

映像の録画と共に音声収録が可能な音声入力端子を搭載しています。
※マイク、マイクアンプ等が別途必要です。


記録映像の管理を行う「診療記録ライブラリ」

ライブラリの中からカルテ番号で検索すると、過去に記録された映像が一覧表示され、すぐに再生できます。記録映像の移動やコピー、削除など一括管理が可能です。「ADMENIC DVP for Cloud」を利用する場合は、クラウド上のデータの管理も行えます。



症例名やキーワード検索を可能にするタグ機能

記録映像に症例名などの文言をタグ付けし、ライブラリで検索ワードとして使用できます。ひとつの記録映像に複数の症例タグを設定することも可能です。症例タグは記録時のほか、ライブラリでも自由に設定/解除できます。

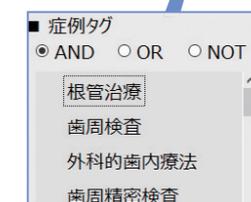


ブックマーク機能

症例映像など、比較再生などで頻繁に使う映像は「お気に入り☆」の別タブに登録することができ、簡単に扱うことができます。

マイクロ診療を記録




映像を見ながら患者説明

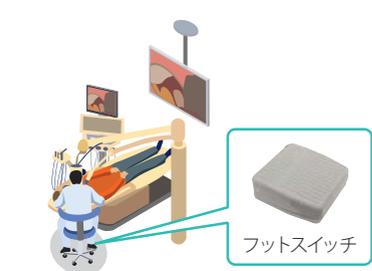

ワンペダルのフットスイッチで録画・停止・チャプターマーク設定を行います。確実に踏んだことを知らせる操作音によって、診療に集中できます。

※有線フットスイッチは製品に付属、無線フットスイッチはオプションです。

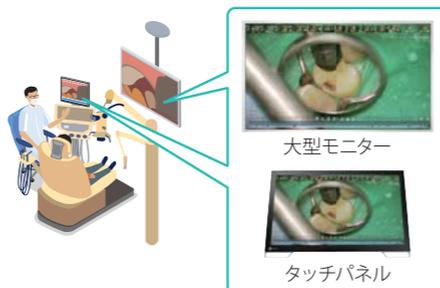

再生操作はすべてタッチパネルで行います。大型モニターを併用することで、手で操作をして、患者さんは大画面で見ることが可能です。